


### Contenu

1 paire de gants de premiers secours  
1 ampoule de lavage oculaire  
1 pansement oculaire  
2 compresses


### Contenuto

1 paio di guanti da primo soccorso  
1 fialetta lavaocchi  
1 bendaggio oculare  
2 compresse

### Vorbereitung Preparation

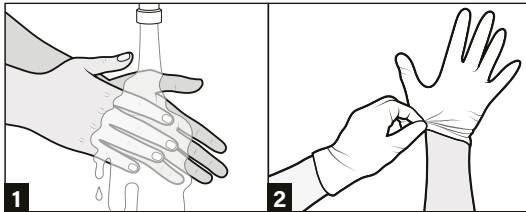

### Soin des blessures oculaires mécaniques Trattamento di lesioni oculari meccaniche

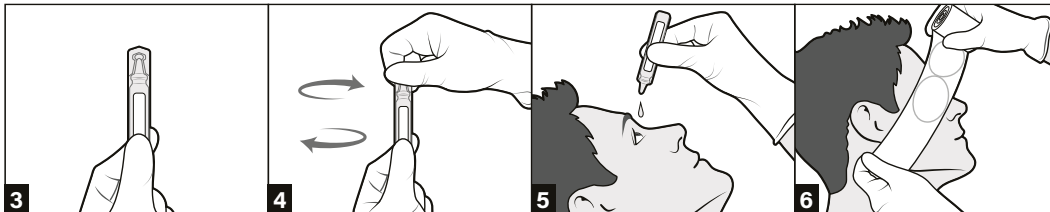

Module exclusivement adapté au traitement des blessures oculaires mécaniques provoquées par des éclats, des copeaux ou des saletés ! Pour le rinçage de l'œil externe après exposition à de faibles quantités de poussières ou de micro-éclats qui ne nécessitent pas l'utilisation d'une quantité plus importante de produit de rinçage oculaire. Utiliser immédiatement le contenu de l'ampoule après ouverture ! Consulter un médecin est recommandé d'une manière générale en cas de blessure oculaire. Consulter immédiatement un médecin si une sensation de corps étranger, une irritation grave ou une douleur persistent.




Modulo adatto esclusivamente al trattamento di lesioni oculari meccaniche causate da schegge, trucioli o sporco! Per il risciacquo dell'occhio esterno dopo l'esposizione a piccole quantità di polvere o microschegge che non richiedono l'uso di una quantità maggiore di collirio. Consumare il contenuto della fiala immediatamente dopo l'apertura! Per le lesioni oculari si raccomanda in generale di consultare un medico. Se persistono sensazioni di corpi estranei, gravi irritazioni o dolori, consultare immediatamente un medico.



Les compresses jointes peuvent être utilisées pour sécher les liquides renversés.

Per asciugare il liquido versato si possono usare le garze accluse.

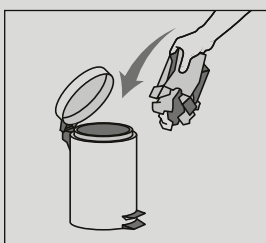

### Élimination et autoprotection Smaltimento e autoprotezione

#### Assurez à présent la protection!

Nettoyez soigneusement les parties du corps ayant été en contact. Si nécessaire, désinfectez ensuite.

#### Ora pensate alla vostra protezione!

Lavate accuratamente le parti contaminate. Se necessario, disinfettare successivamente.