



Coupure / Plaie par perforation Ferita da taglio / Ferita da punta



Contenu


1 paire de gants de premiers secours
2 compresses
1 bande de fixation élastique

Contenuto

1 paio di guanti da primo soccorso
2 compresse
1 benda elastica per fissaggio


Préparation

Preparazione

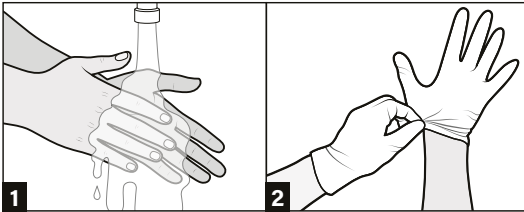


Soin des coupures

Trattamento della ferita da taglio

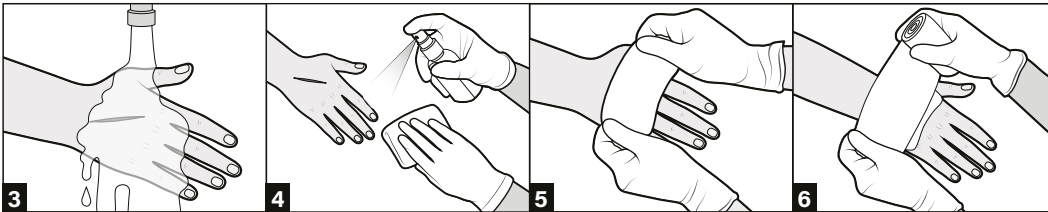

Soin des plaies par perforation

Trattamento della ferita da punta

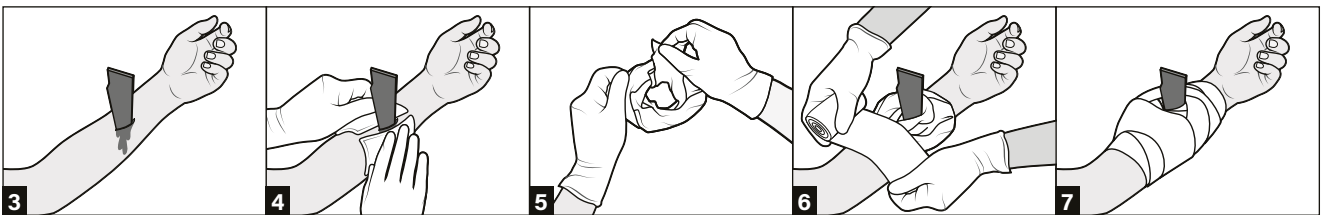

Ne pas extraire soi-même les corps étrangers.

Non rimuovere da soli i corpi estranei.


Ouvrir le module «Bandage triangulaire» et en faire un beignet. Le placer autour du corps étranger.

Aprite il modulo «Fascia triangolare» e formate una ciambella. Posizionarla intorno al corpo estraneo.



Même si la plaie semble petite de l'extérieur, elle peut être profonde et provoquer une hémorragie interne. Le risque d'infection par un corps étranger est également élevé. De telles blessures doivent être immédiatement examinées par un médecin.

Anche se la ferita appare piccola all'esterno, può essere profonda e causare emorragie interne. C'è anche un alto rischio di infezione da corpi estranei. Tali lesioni devono essere esaminate immediatamente da un medico.

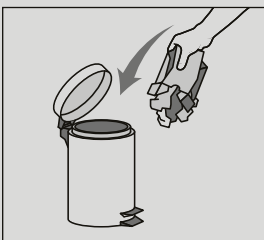

Élimination et autoprotection Smaltimento e autoprotezione

Assurez à présent la protection!

Nettoyez soigneusement les parties du corps ayant été en contact. Si nécessaire, désinfectez ensuite.

Ora pensate alla vostra protezione!

Lavate accuratamente le parti contaminate. Se necessario, disinfettare successivamente.