




Inhalt

1 Paar Erste-Hilfe-Handschuhe
1 Augenspülampulle
1 Augenverband
2 Kompressen


Content

1 pair of first aid gloves
1 ampoule de lavage oculaire
1 pansement oculaire
2 compresses

Vorbereitung Preparation

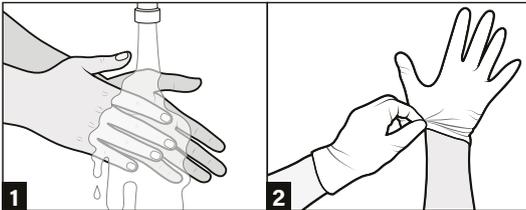

Versorgung mechanische Augenverletzung Care of mechanical eye injuries

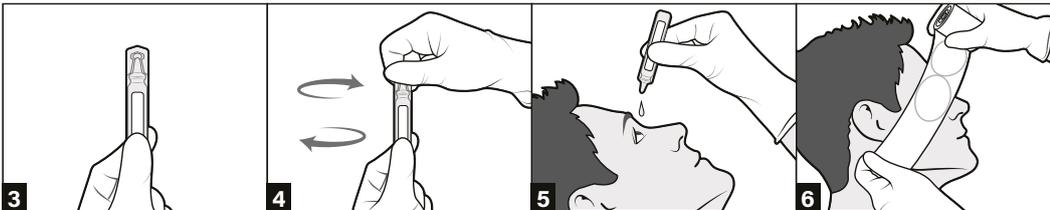

Modul ausschliesslich geeignet zur Versorgung von mechanischen Augenverletzungen hervorgerufen durch Splitter, Späne oder Schmutz! Zur Spülung des äusseren Auges nach Exposition von geringen Mengen an Staub oder Mikrosplintern, bei denen kein Einsatz einer grösseren Augenspülmenge erforderlich ist. Nach Anbruch Inhalt der Ampulle sofort aufbrauchen! Bei Augenverletzungen wird generell empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. Bei Fremdkörpergefühl, starker Reizung oder anhaltenden Schmerzen, sofort einen Arzt aufsuchen.




Module exclusively suitable for the treatment of mechanical eye injuries caused by splinters, chips or dirt! For rinsing the external eye after exposure to small amounts of dust or micro-splinters that do not require the use of a larger amount of eyewash. Use up the contents of the ampoule immediately after opening! In case of eye injuries, it is generally recommended to consult a doctor. In case of foreign body sensation, severe irritation or persistent pain consult a doctor immediately.



Beigefügte Kompressen können zum Trocknen verschütteter Flüssigkeit verwendet werden.

Enclosed compresses can be used to dry spilled liquid.

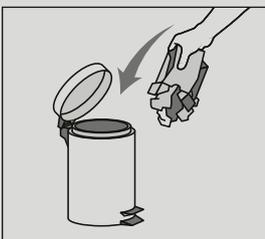

Entsorgung und Selbstschutz Disposal and self-protection

Jetzt Selbstschutz!

In Kontakt gekommene Stellen gründlich reinigen und ggf. danach desinfizieren.

Self-protection now!

Thoroughly clean any areas that have come into contact and disinfect afterwards if necessary.